

kranich ATP-Kissen®

für die Aktivierend-therapeutische Pflege
Liegen | Sitzen | Transport

mehr Stabilität

bessere Regeneration

richtig Wohlfühlen

MADE
IN
GERMANY



kranich+
Kranich

„Der Körper will sich beim Liegen fallen und auffangen lassen. Dafür benötigt er eine individuell angepasste Unterstü­tzungsfläche“

Magdalena Bruss*
und Claudia Eckardt**



Leichtere Bewegungen und Stabilität

Einseitige Belastungen, mangelnde Bewegung, Alter oder Krankheit. Alle diese Faktoren nehmen Einfluss auf unseren Körper und führen zu Veränderungen unserer Körperhaltung und Mobilität.

Unsere Muskulatur passt sich stets den veränderten Anforderungen und Bedingungen an, leider auch mit negativen Folgen. Die Gelenke werden steifer, und es fällt uns schwerer, beispielsweise im Liegen, Entspannung und damit Erholung zu finden. Können wir im Liegen die angebotene Unterstü­tzungsfläche (Matratze oder sonstige Positionierungshilfen) nicht ausreichend annehmen, spüren wir dieses an Muskelverspannungen und Schmerzen.

kranich ATP-Kissen® ermöglichen nicht nur im Liegen sondern auch im Sitzen eine individuelle Anpassung der Unterstü­tzungsfläche an den Körper. Erhöhte Stabilität des Körpers führt zu mehr Sicherheit und Entspannung, wir fühlen uns wohler. Diese Voraussetzungen erleichtern Bewegung, größere Mobilität und verbesserte Orientierung.

„Die **kranich ATP-Kissen®** sind ein gut modellierbares, angemessenes Hilfsmittel zur individuellen Positionierung. Durch ihre Eigenschaften sind sie auch außerhalb der Pflege hervorragende, stützende und klimaregulierende Kissen“.

Grundsätzliche Ziele von Positionierung und Bewegungsübergängen

- Bequemlichkeit
- Ruhe
- Stabilität
- Erleichterung von Bewegung
- Förderung der Wahrnehmung
- Sturzprophylaxe
- Schmerzfreiheit
- Sicherheit
- Tonusregulation
- Kreislaufanregung
- Vorbeugung von Dekubitalgeschwüren, Kontrakturen, Spastik, Aspiration, Pneumonie, Thrombose



*Magdalena Bruss (Pfle­geinstruktorin Bobath BIKA®, i. Ausb.)

**Claudia Eckardt (Pfle­geaufbaukursinstruktorin Bobath BIKA®)

Eigenschaften des kranich ATP-Kissen®

Das innovative **kranich ATP-Kissen®** verbindet die fachlichen Anforderungen der Aktivierend-therapeutischen Pflege mit den heutigen komplexen Hygienevorschriften. Erstmals ist es gelungen, die für die fachlich korrekte Positionierung wichtige Eigenschaft der Verklebung (Federkissen) mit den Hygieneanforderungen eines Klinik-Betriebes in einer hochwertigen modernen Kunstfaser zu vereinen.

Das Füllmaterial der Positionierungskissen ist eine Weiterentwicklung bekannter viscoelastischer Schäume. Man sinkt oberflächlich weich in das Kissen ein, der Körper wird gestützt und die Muskulatur entlastet.

Dabei passt sich das **kranich ATP-Kissen®** exakt an die Körperkontur an, Druckpunkte werden minimiert.

Ein weiterer Vorteil ist seine Thermoelastizität: Während Visco-Schäume abhängig von der Temperatur sind und bei Kälte härter werden, ist das **kranich ATP-Kissen®** temperaturneutral. Es behält bei kühleren Temperaturen seine hohe Anpassungsfähigkeit und wirkt aufgrund seiner speziellen Struktur klimaregulierend. Ein Wärmestau, die damit erschwerte Wundheilung und das Wundliegen (Dekubitus), können verringert werden.

Kunst übertrifft Natur

- Individuelle Anpassung
- Elastizität und Stützkraft
- Druckpunkte minimiert
- Hygienevorschriften erfüllt
- Temperaturneutral
- Wärmestau minimiert
- Langlebig
- Therapiegerecht spezifiziert
- Bezüge zur Wischdesinfektion unnötig

DGATP (Deutsche Fachgesellschaft für Aktivierend-therapeutische Pflege e.V.)

In Zusammenarbeit mit der DGATP (Deutsche Fachgesellschaft für Aktivierend-therapeutische Pflege e.V.) sind das Füllmaterial sowie das Inlett des **kranich ATP-Kissen®** in mehreren „Liege- und Sitzprobungsphasen“ sowie in Wascheignungsprüfungen getestet worden. Die **kranich ATP-Kissen®** sind für alle Einrichtungen des Gesundheitswesens und für das private Zuhause mit spezifischem Bedarf entwickelt worden.

Friedhilde Bartels von der DGATP e.V.: „Aus hygienischen Gründen können keine Federkissen im Gesundheitswesen eingesetzt werden. Eine gute Alternative sind die kranich ATP-Kissen®, eine gelungene Innovation, die hervorragend die Anforderungen an Positionierungskissen erfüllen.“

Aktivierend-therapeutische Pflege in der Anwendung

Die Aktivierend-therapeutische Pflege bezieht die vorhandenen Fähigkeiten und Ressourcen des betroffenen Menschen mit ein.

„Ein angewandtes Aktivierend-therapeutisches Konzept, gepaart mit den richtigen Hilfsmitteln, schafft ein schnelleres Wiedererlangen und Erhalten von Fähigkeiten im Alltag.“

Claudia Eckardt und Magdalena Bruss



Set für Therapeuten

2 Kissen	40 × 40 cm
4 Kissen	40 × 80 cm
1 Kissen	40 × 140 cm

Sondergrößen und individuelle Füllmengen auf Anfrage.

Beispiele von angepassten Positionierungen in Seitenlage

Ziele

- eine normale Schlafposition anzubahnen, bequemes Liegen
- Förderung der Körperwahrnehmung
- Bewegungsfreiheit für Eigenaktivität
- Stabilität für Bewegungsanbahnung für die eigene Körperpflege
- Atemerleichterung und verbesserte Lungenbelüftung
- Minimierung der Aspirationsgefahr
- Sekretabfluss ist erleichtert
- Anbahnung von Schlucken und/oder Mundpflege
- Tonusregulation
- Anbahnung normaler Bewegung
- Entlastung gefährdeter oder schon betroffener Hautarsenale



Schnelle Seitenlage auf der weniger betroffenen Seite



Seitenlage auf der weniger betroffenen Seite



Seitenlage auf der mehr betroffenen Seite



135° – Stabile Seitenlage

Beispiele von Positionierungen in angepasster Rückenlage

Indikationen / Anwendung bei

- Ruhen
- Patienten, die zu starker Überstreckung des Körpers neigen
- zur Anbahnung von Kommunikation, Schlucken
- Entlastung gefährdeter oder schon betroffener Hautarsenale

Ziele

- kurzzeitige Ruheposition und Voraussetzung für anschließende leichtere Aktivitäten

- atemerleichternd
- bessere Bewegungsmöglichkeit
- verbesserte Orientierung im Raum und eigenen Körper
- schmerzentlastend
- Vorbereitung für Eigenaktivität
- bequemes Liegen
- Tonusregulation durch Annahme der Unterstützungsfläche
- Stabilität schaffen als Voraussetzung für Bewegungsaktivität
- Blick in den Raum und auf den eigenen Körper



„A“-Lagerung



Rückenlage

Beispiel des angepassten Sitzens



Stabiles Sitzen

Indikationen / Anwendung bei

- Patienten mit wenig Rumpfstabilität
- Patienten mit geringer Leistungs-, Belastungsfähigkeit
- kreislaufinstabile Patienten
- Schwerstbetroffenen und somnolenten Patienten zur Anbahnung von Bewegung
- zur Anbahnung von Kommunikation, Schlucken
- zur Atemerleichterung

Ziele

- Tonusregulation
- Stabilität schaffen als Voraussetzung für Bewegungsaktivität
- Kreislauftraining
- Bewältigung von Alltagsaktivitäten wie Körperpflege, Anziehen, Essen, Mundpflege
- assoziierte Reaktionen minimieren



kranich ATP-Kissen®

Kissengrößen	40 × 40 cm
	40 × 80 cm
	40 × 140 cm
Bezug	100% Baumwolle
Füllung	90% Polyurethan
	10% Polyester
	Das Füllmaterial entspricht der Öko-Tex 100-Klasse I
Brandschutznorm für Füllung	Das Brennverhalten des Füllmaterials wurde nach der Prüfmethode FMUSS 302 getestet und hat die Anforderungen erfüllt
Waschverhalten	Geeignet für Waschverfahren nach den RKI-Richtlinien im Gesundheitswesen, z.B. nach RAL-GZ 992/2, bis 80° C, mit dem Waschzusatz Majestic Sava
Trocknen	Trockner empfohlen, bis 120° C

Technische Änderungen, Aktualisierungen und Farbabweichungen vorbehalten.

Die **kranich ATP-Kissen®** werden in Deutschland gefertigt.

Gebrauchsmuster/Schutzrechts Nr. 20 2017 101 193

Sondergrößen und individuelle Füllmengen auf Anfrage.

Auch im Programm
Der Funktionssessel
für die Pflege



ATP-Sessel VIANDO+

Der Funktionssessel – entwickelt und gebaut für Menschen mit Handicap

- für Pflege-Anwendungen
- Mobilität durch Rollstuhlfunktion
- Liegeposition bis zur 0-Lage
- motorische Aufstehhilfe
- ermöglicht Aktivitäten
- individuelle Zusatzausstattung

helfen beim helfen

kranich
Kranich+

KRANICHconcept GmbH
Reinbeker Weg 48
21465 Wentorf bei Hamburg
t +49 (0)40 2282 127 20
info@kranich-concept.de
www.kranich-concept.de
www.kranich-care.de